

# INSTRUÇÕES DE USO

DATA: 15/02/2022

REVISÃO: 00

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**NOME COMERCIAL** KIT PAPANICOLAOU COMPLETO NÃO ESTÉRIL AVANT CARE

**Nº DO REGISTRO ANVISA:** 82441200001

**PRODUTO ESTÉRIL ( )SIM ( X ) NÃO**

**MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:**

**VALIDADE:** 02 ANOS

**FABRICANTE RECOMENDA USO UNICO**

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit Papanicolaou Completo Não Estéril é composto por:

- 01- Espéculo tamanho P, M ou G;
- 01- Par de luvas;
- 01- Caixa porta – lâminas;
- 01- Lâmina de vidro;
- 01- Escova cervical;
- 01 – Espátula de Ayre.

## 3. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para auxiliar nos procedimentos ginecológicos e na coleta de material biológico para exame de papanicolaou.

## 4. INSTRUÇÃO DE USO

Abrir a embalagem do produto. Dispor dos componentes do kit para realizar a coleta do material para colpocitologia oncológica (papanicolaou) através de técnica de domínio do profissional. Para uso exclusivo do médico ou paramédico responsável, de acordo com a técnica de domínio do profissional.

## 5. FOTO DO PRODUTO



## 6. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O kit é embalado individualmente em involucro constituído de papel grau cirúrgico e posteriormente em caixas de papel contendo 120 peças.

## 7. CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original.  
Armazenar o produto em local seco e fresco.

## 8. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeccione previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

## 9. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Fabricante: VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 24.562.614/00002-06

Site: [www.avantcare.com.br](http://www.avantcare.com.br)

Responsável Técnica: Talita Andressa de Carvalho CRF 54.199

### Central de Relacionamento

Tel: 11 5049-1662

[vendas@avantcare.com.br](mailto:vendas@avantcare.com.br)

Endereço: Rua Balão Mágico, 1040, Galpão 5, Jd. Rio Cotia, Cotia - SP, CEP: 06715-780