

INSTRUÇÕES DE USO

DATA: 15/02/2022

REVISÃO: 00

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME COMERCIAL KIT PAPANICOLAOU BÁSICO DESCARTÁVEL AVANT CARE

Nº DO REGISTRO ANVISA: 82441200003

PRODUTO ESTÉRIL ()SIM

(X) NÃO

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:

VALIDADE: 02 ANOS

FABRICANTE RECOMENDA USO UNICO

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit Papanicolaou Básico Descartável é composto por:

01- Caixa porta – lâminas;

01- Lâmina de vidro;

01- Escova cervical;

01 – Espátula de Ayre.

3. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para auxiliar nos procedimentos ginecológicos e na coleta de material biológico para exame de papanicolaou.

4. INSTRUÇÃO DE USO

Abrir a embalagem do produto. Dispor dos componentes do kit para realizar a coleta do material para colpocitologia oncótica (papanicolaou) através de técnica de domínio do profissional. Para uso exclusivo do médico ou paramédico responsável, de acordo com a técnica de domínio do profissional.

5. FOTO DO PRODUTO



6. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O kit é embalado individualmente em involucro constituído de papel grau cirúrgico e posteriormente em caixas de papel contendo 240 peças.

7. CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização a fim de manter a sua esterilidade.

Armazenar o produto em local seco e fresco.

8. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeccione previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica a fim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

9. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Fabricante: VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 24.562.614/00002-06

Site: www.avantcare.com.br

Responsável Técnica: Talita Andressa de Carvalho CRF 54.199

o texto aqui

Central de Relacionamento

Tel: 11 5049-1662

vendas@avantcare.com.br

Endereço: Rua Balão Mágico, 1040, Galpão 5, Jd. Rio Cotia, Cotia - SP, CEP: 06715-780