

# INSTRUÇÕES DE USO

DATA: 15/02/2022

REVISÃO: 00

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**NOME COMERCIAL** KIT CURATIVO SIMPLES PLUS AVANT CARE

**Nº DO REGISTRO ANVISA:** 82441209016

**PRODUTO ESTÉRIL** ( X ) SIM ( ) NÃO

**MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:** ETO

**VALIDADE:** 02 ANOS

**USO UNICO:** PROIBIDO REPROCESSAR

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit Curativo simples Plus é composto por:

- 01- Campo para cobertura de mesa;
- 01- Pinça Anatômica;
- 01- Pinça dente de rato;
- 01- Pinça Kelly;
- 01 - Par de Luvas Nitrílica.

## 3. INDICAÇÃO DE USO

É um kit composto pelos componentes necessários auxiliar na higienização de ferimentos e procedimentos cirúrgicos.

## 4. INSTRUÇÃO DE USO

Deve ser usado por profissional de saúde para realização de limpeza de feridas e aplicação de curativo. Manusear itens praticando técnica asséptica a fim e de evitar contaminação dos componentes. Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.

## 5. FOTO DO PRODUTO



## 6. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O kit é embalado individualmente em involucro constituído de papel grau cirúrgico e posteriormente em caixas de papel contendo 48 peças.

## 7. CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização a fim de manter a sua esterilidade.

Armazenar o produto em local seco e fresco.

## 8. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspecione previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica a fim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

## 9. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Fabricante: VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 24.562.614/00002-06

Site: [www.avantcare.com.br](http://www.avantcare.com.br)

Responsável Técnica: Talita Andressa de Carvalho CRF 54.199

### Central de Relacionamento

Tel: 11 5049-1662 [vendas@avantcare.com.br](mailto:vendas@avantcare.com.br)

Endereço: Rua Balão Mágico, 1040, Galpão 5, Jd. Rio Cotia, Cotia - SP, CEP: 06715-780