

DATA: 15/02/2022

REVISÃO: 00

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**NOME COMERCIAL** KIT EPIDURAL BÁSICO ESTÉRIL AVANT CARE

**Nº DO REGISTRO ANVISA:** 82441209006

**PRODUTO ESTÉRIL**      **SIM**                                      **NÃO**

**MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:** ETO

**VALIDADE:** 02 ANOS

**USO ÚNICO:** PROIBIDO REPROCESSAR

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit Epidural Básico é composto por:

- 1 Seringa Hipodérmica 5 ml Luer Lock
- 1 Seringa Hipodérmica 20 ml Luer Lock
- 1 Seringa Epidural 10 ml LOR
- 1 Agulha Hipodérmica 26G 1/2 " 0,45X13
- 1 Agulha Hipodérmica 21G 1 1/2 " 0,80X30
- 1 Agulha Romba para Aspiração
- 5 Compressa de Gaze
- 3 Esponjas para Antissepsia
- 1 Campo Cirúrgico
- 1 Campo Cirúrgico Fenestrado com Adesivo
- 1 Bandeja destacável para auxiliar na antissepsia

## 3. INDICAÇÃO DE USO

Kit pronto para uso, descartável, com os insumos básicos para auxiliar no procedimento de anestesia epidural.

## 4. INSTRUÇÃO DE USO

Abrir embalagem do produto com técnica asséptica. Dispor dos componentes do Kit para realizar o procedimento através da técnica de domínio do profissional. Para uso exclusivo do médico ou paramédico responsável.

## 5. FOTO DO PRODUTO



## 6. APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Os componentes do kit são acomodados em uma bandeja, envolvida com a cobertura de mesa dobrada com técnica asséptica, e embalados individualmente em invólucro constituído de papel grau cirúrgico.

## 7. CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização afim de manter a sua esterilidade. Armazenar o produto em local seco e fresco.

## 8. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeccione previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- A embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

## 9. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Fabricante: VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 24.562.614/00002-06  
Site: [www.avantcare.com.br](http://www.avantcare.com.br)  
Responsável Técnica: Talita Andressa de Carvalho CRF 54.199



### Central de Relacionamento

Tel: 11 5049-1662 [vendas@avantcare.com.br](mailto:vendas@avantcare.com.br)  
Endereço: Rua Balão Mágico, 1040, Galpão 5, Jd. Rio Cotia, Cotia - SP, CEP: 06715-780