

# INSTRUÇÕES DE USO

DATA: 15/02/2022

REVISÃO: 00

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**NOME COMERCIAL** KIT SUTURA PLUS AVANT CARE

**Nº DO REGISTRO ANVISA:** 82441209014

**PRODUTO ESTÉRIL** ( X )SIM ( ) NÃO

**MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:** ETO

**VALIDADE:** 02 ANOS

**USO UNICO:** PROIBIDO REPROCESSAR

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit Sutura Plus é composto por:

- 01- Campo cirúrgico fenestrado;
- 01- Campo para cobertura de mesa;
- 05- Compressa de gaze;
- 01- Fio de Sutura;
- 01 - Pinça dente de rato;
- 01- Porta agulhas Mayo Hegar;
- 01 - Tesoura Íris;
- 01 - Par de luvas nitrílica.

## 3. INDICAÇÃO DE USO

O Kit sutura estéril descartável contém todo material necessário para sutura de regiões superficiais da pele, podendo servir para o atendimento de emergência ou procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em hospitais ou consultórios.

## 4. INSTRUÇÃO DE USO

Abrir a embalagem do produto com técnica asséptica, de acordo com a técnica de domínio do médico ou paramédico responsável pela realização de sutura.

## 5. FOTO DO PRODUTO



## 6. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O kit é embalado individualmente em involucro constituído de papel grau cirúrgico e posteriormente em caixas de papel contendo 40 peças.

## 7. CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização a fim de manter a sua esterilidade.

Armazenar o produto em local seco e fresco.

## 8. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeção previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica a fim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

## 9. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Fabricante: VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 24.562.614/00002-06

Site: [www.avantcare.com.br](http://www.avantcare.com.br)

Responsável Técnica: Talita Andressa de Carvalho CRF 54.199

### Central de Relacionamento

Tel: 11 5049-1662

[vendas@avantcare.com.br](mailto:vendas@avantcare.com.br)

Endereço: Rua Balão Mágico, 1040, Galpão 5, Jd. Rio Cotia, Cotia - SP, CEP: 06715-780