

INSTRUÇÕES DE USO

DATA: 01/02/2023

REVISÃO: 01

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME COMERCIAL KIT PEQUENAS CIRURGIAS AVANT CARE

Nº DO REGISTRO ANVISA: 82441209007

PRODUTO ESTÉRIL: (X)SIM () NÃO

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ETO

VALIDADE: 02 ANOS

USO UNICO: PROIBIDO REPROCESSAR

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit Pequenas Cirurgias é composto por:

01 pinça dente-de-rato, fabricada em liga metálica com banho de aço inox, de 14cm.

01 pinça anatômica, fabricada em liga metálica com banho de aço inox, de 14cm.

01 pinça Kelly de ponta curva, fabricada em liga metálica com banho de aço inox, de 14cm.

01 porta agulhas Mayo Hegar fabricada em liga metálica com banho de aço inox, de 14cm.

01 tesoura Iris reta fabricada em liga metálica com banho de aço inox, de 11,5cm.

01 campo cirúrgico fenestrado em SSMMS, 100% em polipropileno, impermeável, gramatura de 40g/m², com janela 10x10cm, 40x40 cm de comprimento


3. INDICAÇÃO DE USO

Kit de instrumental para auxílio em pequenas cirurgias, podendo servir para o atendimento de emergências ou procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em hospitais ou consultórios.

4. INSTRUÇÃO DE USO

Abrir a embalagem com técnica asséptica, de acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde, para realização de pequenas cirurgias em geral.

5. FOTO DO PRODUTO

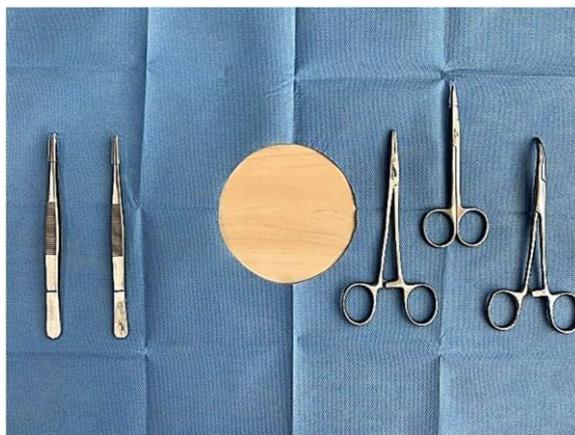

6. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalagem primária: blister de plástico rígido selado com papel grau cirúrgico.
Embalagem secundária: Saco plástico com 20 micras, selado hermeticamente.

7. CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização afim de manter a sua esterilidade.

Armazenar o produto em local seco e fresco.

8. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeccione previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto descartável de uso único. Destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

9. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Fabricante: VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 24.562.614/00002-06
Site: www.avantcare.com.br
Responsável Técnica: Talita Andressa de Carvalho CRF 54.199

Central de Relacionamento

Tel: 11 5049-1662 vendas@avantcare.com.br
Endereço: Rua Balão Mágico, 1040, Galpão 5, Jd. Rio Cotia, Cotia - SP, CEP: 06715-780