

INSTRUÇÕES DE USO

REVISÃO: 00

NOME COMERCIAL KIT PAPANICOLAOU COMPLETO ESTÉRIL AVANT CARE

Nº DO REGISTRO ANVISA: 82441200004

PRODUTO ESTÉRIL (x)SIM () NÃO

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ETO

VALIDADE: 02 ANOS

USO UNICO: CONSTAR SE FOR DE USO ÚNICO

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit Papanicolaou Completo Estéril é composto por:

- 01- Espéculo tamanho P, M ou G;
- 01- Par de luvas;
- 01- Caixa porta lâminas;
- 01- Lâmina de vidro;
- 01- Escova cervical;
- 01 Espátula de Ayre.

3. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para auxiliar nos procedimentos ginecológicos e na coleta de material biológico para exame de papanicolaou.

4.INSTRUÇÃO DE USO

Abrir a embalagem do produto com técnica asséptica. Dispor dos componentes do kit para realizar a coleta do material para colpocitologia oncótica (papanicolaou) através de técnica de domínio do profissional. Para uso exclusivo do médico ou paramédico responsável, de acordo com a técnica de domínio do profissional.

5. FOTO DO PODUTO



6. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O kit é embalado individualmente em involucro constituído de papel grau cirúrgico e posteriormente em caixas de papel contendo 120 peças.

7.CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização a fim de manter a sua esterilidade.

Armazenar o produto em local seco e fresco.

8. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspecione previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

9. IDENTIFICAÇÃO DO IMPORTADOR

Importador e Distribuidor Por: VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 24.562.614/00002-06 Site: www.avantcare.com.br

Responsável Técnica: Talita Andressa de Carvalho CRF 54.199